

HARMONIX

DE

TravelerAI-Serie



Handbuch des LCD-Ladekoffers

T110-BLK

T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-DE
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Bedienung des Ladefachs



Beleuchten des Bildschirms

Methode 1: Öffnen Sie die Ladefachabdeckung, das Display leuchtet automatisch auf.

Methode 2: Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, klicken Sie auf den Bildschirm, um ihn einzuschalten.

Methode 3: Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste unter dem Ladekoffer, um den Bildschirm zum Leuchten zu bringen.

Bildschirm ausschalten

Automatische Abschaltung: Nach dem Einschalten des Bildschirms für 30 Sekunden ohne Bedienung. Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus. Manuelles Schließen: Drücken Sie die Multifunktionstaste des Ladekoffers einmal, um den Bildschirm auszuschalten.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme ein.

Methode 1: Laden und aktivieren Sie das Ladeetui über die Type-C-Schnittstelle.

Methode 2: Halten Sie die Multifunktionstaste am Ladeetui 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Tipp: Dieses Produkt ist ab Werk standardmäßig ausgeschaltet. Bei der ersten Inbetriebnahme müssen Sie es aktivieren und einrichten.

Benutzeroberfläche für den Sperrbildschirm

Entsperren: Schieben Sie nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren



Musik-Interface



◀ ▶/⏸ ▶

Letztes Lied Abspielen / Pause Nächstes Lied

Schnittstelle zur Lautstärkeregelung



◀- ▶+

Lautstärke reduzieren, Mindestlautstärke ist 0 Lautstärke erhöhen, maximale Lautstärke ist 16

Weltraum-Sound-Schnittstelle



Equalizer-Schnittstelle



Timer-Alarm-Schnittstelle



Schnittstelle für Lichtstärke




Schnittstelle zum Sprachwechsel



Benutzeroberfläche "Meinen Kopfhörer suchen"



Klicken Sie zum Starten, die Zahl 2 erscheint und der Kopfhörerlautsprecher gibt den Ton aus

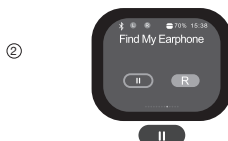

Tiktok-Funktion zum Umblättern von Seiten

Muss mit einem drahtlosen Mobilteil, z. B. einem Mobiltelefon, verbunden werden.

1. Diese Funktion ist nur für die Verwendung mit TIKTOK-Software verfügbar, und andere Software funktioniert oft nicht damit.
2. Diese Funktion kann mit einigen Telefonen Kompatibilitätsprobleme haben, und einige Telefone können sie möglicherweise nicht verwenden.
3. Wenn es Situationen gibt, in denen es nicht verwendet werden kann, ignorieren Sie diese Funktion bitte



Klicken Sie auf dieses Symbol, das aktuelle Kurzvideo wird geliked



Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wechseln Sie zum vorherigen kurzen Video

Mit einem Klick auf dieses Symbol gelangen Sie zum nächsten kurzen Video

Taschenlampen-Schnittstelle



Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Taschenlampe einzuschalten, der gesamte Bildschirm wird weiß und die Helligkeit des Bildschirms nimmt zu.

Fotografie-Funktion

Muss mit einem drahtlosen Mobilteil, wie z. B. einem Mobiltelefon, verbunden sein


1. Diese Funktion ist nur für das Aufnehmen von Fotos mit der eingebauten Kamera des Telefons verfügbar. Andere Aufnahmesoftware ist möglicherweise nicht in der Lage, sie zu verwenden.
2. Diese Funktion kann Kompatibilitätsprobleme haben und einige Telefone können sie möglicherweise nicht verwenden.
3. Wenn es Situationen gibt, in denen es nicht verwendet werden kann, ignorieren Sie diese Funktion.



Öffnen Sie die Kamera des Telefons, klicken Sie auf die Schaltfläche, und das Telefon beginnt mit dem Aufnehmen von Fotos.

Hinweis: Wenn Sie sich nicht im Aufnahmemodus befinden, können Sie durch Klicken auf diese Fotoschaltfläche die Lautstärke erhöhen.

Definition der Funktion der multifunktionalen Tasten.

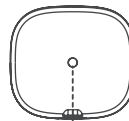

Multifunction key



Einmal klicken: Ein/Aus Bildschirm

3 Sekunden lang drücken: Drücken Sie im Einschaltmodus 3 Sekunden lang, und auf dem Bildschirm werden die Symbole für das Herunterfahren und den Neustart angezeigt.

Ein Klick auf das Symbol kann zum Herunterfahren oder Neustart führen.

8 Sekunden lang drücken: Im Abschaltmodus 8 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten.

10 Sekunden lang drücken: Starten Sie das System neu (auf dem Display wird der Startbildschirm angezeigt)

Dieser Vorgang kann ausgeführt werden, wenn das System abstürzt und nicht bedient werden kann.

harmonix.is

harmonixhearing.com

HARMONIX

**Link zum
Harmonix-
Kundendienst**



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA