

HARMONIX

FI

TravelerAI-sarja



LCD-latauskotelon käyttöopas

T110-BLK
T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-FI
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Latauslokero toiminta



Näytön valaiseminen

Tapa 1: Avaa latauslokero kansi, näyttöön syttyy automaattisesti.

Tapa 2: Kun näyttö on pois päältä, napsauta näyttöä kääntääksesi sen.

Tapa 3: Paina latauskotelon alla olevaa monitoimipainiketta kerran sytyttääksesi näytön.

Sammuta näyttö

Automaattinen sammutus: Kun näyttö on kytketty päälle 30 sekunniksi ilman käyttöä. Näyttö sammuu automaattisesti.

Manuaalinen sulkeminen: Paina latauskotelon monitoimipainiketta kerran sammuttaaksesi näytön.

Huomautus: Ensimmäisellä käyttökerralla kytke virta päälle

Menetelmä 1. Lataa ja aktivoi latauskotelo TYPE-C-liitännän kautta.

Menetelmä 2. Käynnistä laite painamalla latauskotelon monitoimipainiketta pitkään 5 sekunnin ajan

Vinkki: Tämä tuote on oletuksena sammutustilassa, kun se lähtee tehtaalta. Ensimmäinen käyttö edellyttää aktivointia ja asetuksia.

Lukitusnäytön käyttöliittymä

Avaa: Avaa näytön lukitus liu'uttamalla oikealle



Musiikin käyttöliittymä



Viimeinen
laulu

Toista /
Tauko

Seuraava
kappale

Äänenvoimakkuuden säätöliittymä



Vähennä äänenvoimak-
kuutta, minimiäänenvo-
imakkuus on 0



Lisää äänenvoimak-
kuutta, maksimiään-
voimakkuus on 16

Gränssnitt för rymdlyd



Gränssnitt för equalizer



Gränssnitt för timerlarm



Gränssnitt för ljusnivå



Gränssnitt för språkbyte



Hitta mitt hörlursgränssnitt



Funktion för att vända Tiktok-sida

Måste anslutas till en trådlös telefon, t.ex. en mobiltelefon.

1. Denna funktion är endast tillgänglig för användning med TIKTOK-programvara, och andra program fungerar ofta inte med den.
2. Den här funktionen kan ha kompatibilitetsproblem med vissa telefoner, och vissa telefoner kanske inte kan använda den.
3. Om det finns situationer där den inte kan användas, vänligen ignorera den här funktionen



Klicka på den här ikonen, den aktuella korta videon kommer att gillas



Om du klickar på den här ikonen växlar du till föregående korta video

Genom att klicka på den här ikonen växlar du till nästa korta video

Gränssnitt för ficklampa



OPEN

Klicka på knappen för att tända ficklampan, hela skärmen blir vit och skärmens ljusstyrka ökar.

Funktion för fotografering

Måste anslutas till en trådlös telefon, t.ex. en mobiltelefon

1. Den här funktionen är endast tillgänglig för att ta bilder med telefonens inbyggda kamera. Andra fotograferingsprogram kanske inte kan använda den.
2. Den här funktionen kan ha kompatibilitetsproblem, och vissa telefoner kanske inte kan använda den.
3. Om det finns situationer där den inte kan användas, vänligen ignorera den här funktionen.



Öppna telefonens kamera, klicka på knappen och telefonen börjar ta bilder.

Notera: när du inte är i fotograferingsläge ökar volymen genom att klicka på den här fotoknappen.

Definition av multifunktionella knappars funktion.



Multifunction key

Klicka en gång: På/av skärmen

Långt tryck i 3 sekunder: I påslagningsläge, tryck länge i 3 sekunder, och skärmen kommer att dyka upp avstängnings- och omstartssikoner.

Genom att klicka på ikonen kan du stänga av eller starta om.

Långt tryck i 8 sekunder: I avstängt läge, tryck länge i 8 sekunder för att slå på enheten.

Tryck länge i 10 sekunder: Starta om systemet (displayen visar startskärmen)

Denna operation kan utföras när systemet kraschar och inte kan användas.

harmonix.is
harmonixhearing.com

HARMONIX

**Harmonixin
asiakaspalvelulinkki**



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA